


SonicLine

Scaler/Paro | SF1-8

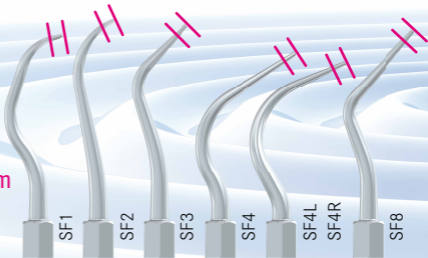

== max. 2 mm



Indicazione

Livello di potenza SF1LM

	1	2	3	
Scaler	1	2	3	
Profilassi implantare	1	2	●	
Paro	1	2	3	
Prep. delle corone, stripping, shaping	1	●	●	
Prep. delle cavità, Inlay	1	●	3	
Tecnica delle faccette	1	●	●	
Lavorazione delle fessure	1	2	3	
Endo*	1	2	●	
Chirurgia**	1	2	●	

Attenzione: *SF65, **SFS103 - 105 solo al livello 1.

**SFS100/101/102/109 consentito anche al livello 3.

- consentito
- solo per brevi intervalli
- non è consentito