

Rifiuto intelligente del lavoro

PolyBur® P1 – la terapia autolimitante della carie

© 01/2012 - 406017V0

Quality Products
Made in Germany

L'escavazione in prossimità della polpa richiede una elevatissima precisione, perché spesso alcuni decimi di millimetro fanno la differenza tra conservativa ed endodonzia. A motivo della particolare durezza del materiale polimerico, la fresa di nuova generazione PolyBur® P1 asporta solo dentina cariata. Appena la fresa incontra dentina sana - che non deve essere asportata - le sue lame perdono immediatamente il filo e non lavorano più.

In questo modo si evita una sovrapparazione e si lavora in modo ancora più attento e conservativo. La fresa PolyBur® P1 va usata per la fase terminale e più delicata dell'escavazione. Non può e non deve essere utilizzata da sola, ma unicamente dopo l'impiego di una fresa per escavazione di tipo rigido, come per es. la K1SM in ceramica al biossido di zirconio.

**Kit 4608.204**con 25 strumenti
(10x 014 | 10x 018 | 5x 023)**P1.204.014/018/023**Patente:
DE 10 2008 010 049
EP 2 260 787